






Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная УанТач Верико Рефлект (OneTouch Verio Reflect®)

Краткое руководство пользователя

В этом руководстве приведены краткие сведения о глюкометре и описан порядок действий для начала работы.

ВАЖНО! Прочитайте руководство пользователя из комплекта поставки системы.


Значки, отображаемые глюкометром

-  Функция Bluetooth® включена
-  Синхронизация
-  Результат теста с контрольным раствором
-  Низкий заряд батареи
-  Точки, обозначающие прогресс навигации по экрану

Символы и значки, отображаемые глюкометром, а также их значения см. в руководстве пользователя.

Уполномоченный представитель в России: ООО «ЛайфСкан Раша»
Российская Федерация, 121614
г. Москва, ул. Крылатская
д. 17, корп. 4, эт. 2, пом. 1, ком. 2

Горячая линия OneTouch®: 8-800-200-83-53
(звонок по России бесплатный).
Время работы: круглосуточно с 9:00
понедельника до 21:00 пятницы.

 Ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГибХ»
Губельштрассе 34
6300 Цуг, Швейцария
LifeScan Europe GmbH
Gubelstrasse 34
6300 Zug, Switzerland

 CE 0344


 Lifescan




OneTouch®
AW 07219001B
© 2018–2021 LifeScan IP Holdings, LLC
Дата редакции макета: 02/2021

Fold


1 Настройка глюкометра

Включите глюкометр

Нажмите и удерживайте кнопку  до появления экрана приветствия.

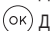С помощью кнопки  или  задайте требуемые значения каждого параметра и нажмите  для подтверждения.

Установите язык

Выделите необходимый язык и нажмите .


Опционально: завершите настройку с помощью мобильного приложения OneTouch Reveal®*

Нажмите **Да**, чтобы приложение провело вас через настройку.




Загрузите мобильное приложение OneTouch Reveal® до синхронизации глюкометра и мобильного устройства.



Установите время


Если время задано верно, нажмите , в противном случае внесите изменения и подтвердите их.

* На веб-сайте www.OneTouch.ru можно узнать, доступно ли мобильное приложение OneTouch Reveal® в вашей стране, и ознакомиться с подробной информацией о нем.

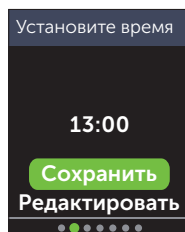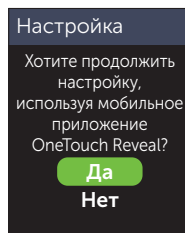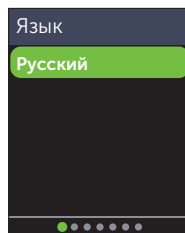


Fold


Установите дату

Если дата задана верно, нажмите , в противном случае внесите изменения и подтвердите их.


Установите границы диапазонов «До еды» и «После еды»

Если предварительные настройки границ диапазонов «До еды» и «После еды» указаны верно, нажмите , в противном случае внесите изменения и подтвердите их.





Настройте трекер тестов

Если предварительно установленный план верный, нажмите , в противном случае внесите изменения и подтвердите их.

Установите среднее значение целевого уровня глюкозы за 90 дней

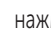Если среднее значение целевого уровня глюкозы за 90 дней установлено верно, нажмите , в противном случае внесите изменения и подтвердите их.


ПРИМЕЧАНИЕ. Обсудите с врачом подходящие для вас значения границ диапазона, частоту самоконтроля уровня глюкозы в крови (план по количеству измерений в день) и среднее значение целевого уровня глюкозы в крови за 90 дней.

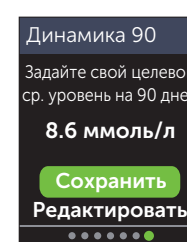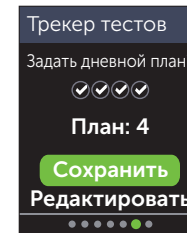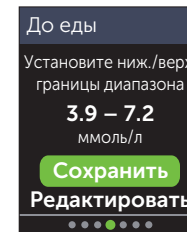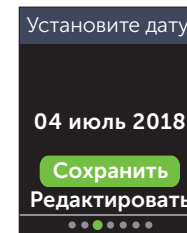

Fold

2 Проведение измерения

Перед получением образца крови вымойте руки теплой водой с мылом, ополосните и вытрите их насухо. Снимите колпачок ручки для прокалывания и вставьте стерильный ланцет. Снимите защитную крышку. Установите колпачок обратно.

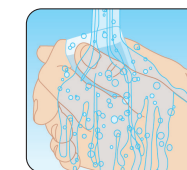


Вставьте тест-полоску (золотистой стороной и 2-мя серебристыми зубцами к себе), чтобы включить глюкометр.



Зона для ввода тест-полоски

Отрегулируйте глубину прокола на ручке для прокалывания. Возведите ручку для прокалывания и плотно прижмите к кончику пальца сбоку. Нажмите кнопку спуска. Слегка сожмите палец, пока не появится круглая капля крови.

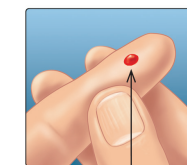

Приблизительный размер

Нанесите образец крови, прикоснувшись к нему любой из двух сторон капилляра тест-полоски. Когда капилляр наполнится, он станет красным, результат отобразится через 5 секунд.

Fold

Fold

Fold


3

Просмотр результатов

Динамический индикатор диапазона ColourSure®

Динамический индикатор диапазона ColourSure® позволяет мгновенно узнать, находится ли ваш результат ниже (голубой), выше (красный) или в пределах (зеленый) диапазона. Он также оповестит о приближении вашего уровня глюкозы к нижней или верхней границе целевого диапазона. Текстовое сообщение или смайлик указывают на сегмент цветовой шкалы.

Примеры результатов

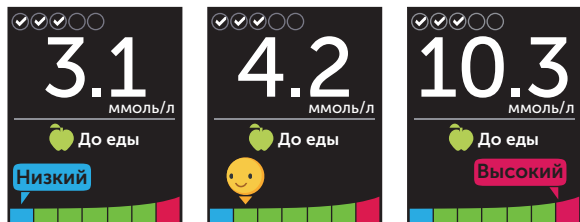


Ниже диапазона

Нижняя граница диапазона

Выше диапазона

Добавление отметок о еде и других событиях


Отметка «До еды» (🍏) будет автоматически добавлена к результату. Вы можете изменить эту отметку на отметку «После еды» (🍷) и добавить отметку о событии.

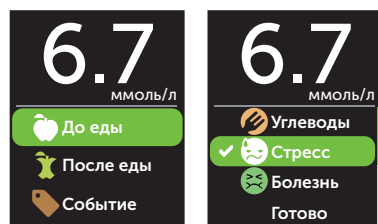

Сообщения функции Помощника Blood Sugar Mentor

Функция Помощник Blood Sugar Mentor сообщает, как у вас дела, и дает советы по управлению диабетом, к числу которых относятся информационные и мотивирующие сообщения, основанные на текущем и предыдущих результатах измерения уровня глюкозы и других отслеживаемых данных.

Примеры сообщений функции Помощника Blood Sugar Mentor

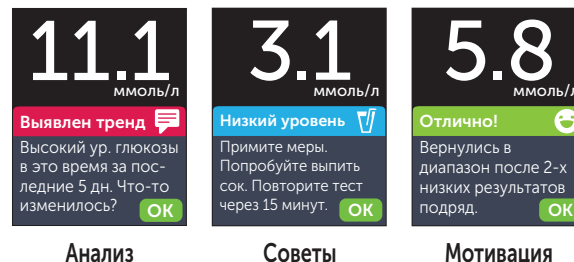

Анализ

Советы

Мотивация

Blood Sugar - глюкоза крови, Mentor - помощник.

Наименование и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими корпорации Bluetooth SIG, Inc., и используются компанией LifeScan Scotland Ltd. по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

4

Подключение к мобильному устройству



Технология Bluetooth® позволяет отправлять по беспроводной связи результаты измерений на мобильное устройство, на котором с помощью мобильного приложения OneTouch Reveal® можно просматривать результаты и строить графики, устанавливать дневные планы по тестам, просматривать сообщения функции Помощника Blood Sugar Mentor и выявлять тренды.

В разделе Настройки выделите раздел Bluetooth и нажмите **OK**.

Значок ✓ указывает, включена или выключена функция Bluetooth® в данный момент.

Нажмите **↑** или **↓**, чтобы изменить состояние функции Bluetooth® на «включено» и нажмите **OK**.

При отображении запроса на мобильном устройстве введите указанный PIN-код.

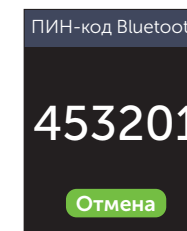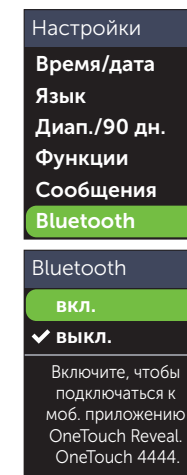

Пример PIN-кода










ONETOUCH Verio Reflect®

Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная УанТач Верлио Рефлект (OneTouch Verio Reflect®)

Краткое руководство пользователя



AW 07219001B

Lifescan Description: QSG OTVR RUru		Art Agency: AMPLEXOR		Job No.: 57487							
File Name/Rev.: AW07219001B			Agency Contact: Jane O'Callaghan								
CPS Reference No.: For CPS number refer to the DMS object under Links & Attachments			JDE Item No.: N/A		Rev. Date: 03-Mar-21						
ADS No./Rev.: 0000561 Rev 4		ADS ID: LCG-07	Dieline No./Rev.: N/A		No. of Covers: N/A <input checked="" type="checkbox"/>						
Language Sequence: Russian			Inside No. of pages: N/A <input checked="" type="checkbox"/>		No. of sides: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/>						
			Spot Colors			Process Colors		Uncoated Area		Special Instructions	
PMS N/A <input checked="" type="checkbox"/>		 <input checked="" type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>		 <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		N/A <input checked="" type="checkbox"/>		 <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
PANTONE® is a registered trademark of Pantone, Inc. All information contained herein is the CONFIDENTIAL property of LifeScan and may not be duplicated or released without the expressed written permission of LifeScan.										Dieline  = CUT  = SCORE  = PERF	