

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Acticoat 5x5cm IFU (Russian)
CODE:	#66000808
THIS BSC:	xxxxxxxx / 46521
PREV BSC:	
DATE:	11.12.2013
REVISION:	02

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1531		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	JW



ACTICOAT[®]

с нанокристаллами SILCRYST[®]

Антимикробная повязка с серебром

СТЕРИЛЬНО R Радиационный метод стерилизации. Не использовать повязку из открытой или поврежденной упаковки. Предназначено только для однократного использования. Повторная стерилизация не допускается. Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°C/77°F. Избегать воздействия света и температуры выше 50°C/120°F.

Описание

Антимикробная защитная повязка ACTICOAT[®] состоит из трех слоев: внутреннего абсорбирующего вискозно-полиэфирного слоя и двух наружных слоев из полиэтиленовой непроницаемой сетки с нанокристаллами серебра.

ACTICOAT – это абсорбирующая раневая повязка, которая помогает регулировать влажную среду на поверхности раны. Повязка имеет травматический нижний слой, который не прилипает к раневой поверхности, что позволяет свести к минимуму возможность травматических повреждений при смене повязки.

Нанокристаллы серебра обеспечивают эффективную защиту от контаминации патогенными микроорганизмами из окружающей среды, способствуя быстрейшему заживлению раны. Нанокристаллическое серебро защищает рану и от микробов, присутствующих в ране, снижая риск ее вторичного инфицирования. ACTICOAT сохраняет антимикробные свойства в течение 3 суток.

Показания к применению для лечения ран: ACTICOAT рекомендуется использовать в качестве абсорбирующей антимикробной повязки при лечении поверхностных и глубоких ран, включая пролежни, венозные трофические язвы, диабетические язвы, ожоги, реципиентные участки при пересадке кожи. ACTICOAT может также использоваться для инфицированных ран. При использовании в инфицированных ранах необходимо определение возбудителя инфекции и лечение согласно принятому клиническому протоколу.

Показания к применению на местах введения катетера:

ACTICOAT 5см x 5см / 2" x 2" рекомендуется использовать в качестве антимикробной повязки на местах введения катетера. ACTICOAT 5см x 5см / 2" x 2" может также использоваться при катетер-ассоциированных инфекциях. При использовании повязки в инфицированных местах введения катетера необходимо определение возбудителя инфекции и лечение согласно принятому клиническому протоколу.

Противопоказания

- Не применять у пациентов с повышенной чувствительностью к серебру.
- Не применять у пациентов, во время проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ).
- Пред проведением радиационной терапии повязку следует удалить. Новую повязку можно накладывать в плановом порядке.

Меры предосторожности

- Не увлажнять для использования на местах введения катетера.
- Только для наружного применения.

- Повязка ACTICOAT не совместима с препаратами на масляной основе, такими как вазелин.
- Избегать контакта повязки с электродами или токопроводящими гелями во время электронных измерений, например, при ЭЭГ и ЭКГ.
- Не использовать при изменении цвета повязки.
- Поступали сведения о возникновении временной боли при использовании ACTICOAT. Вероятность возникновения болевых симптомов можно минимизировать, следуя инструкции по применению. Если боль была длительной, снимите повязку и прекратите ее использование.
- ACTICOAT следует использовать для лечения недоношенных детей (менее 37 недель беременности) только в том случае, когда польза от применения продукта превышает потенциальный риск. Данные клинических исследований для этой группы детей отсутствуют, есть лишь ограниченные сведения по его использованию для доношенных новорожденных.

Инструкция по применению на ранах:

- Извлеките повязку ACTICOAT из упаковки, сохраняя стерильность.
- Смочите поверхность повязки питьевой водой (НЕ используйте физиологический раствор). Удалите излишки воды до аппликации, положив повязку на стерильную поверхность на 2 минуты.
- При необходимости вырежьте повязку по форме раны.
- Наложите повязку на поверхность раны.
- Зафиксируйте повязку ACTICOAT вторичной повязкой, которая будет поддерживать влажную раневую среду. При большом количестве экссудата в ране, используйте абсорбирующую вторичную повязку, при этом пленочные покрытия не рекомендуются.
- Сохраняйте повязку влажной, но не настолько, чтобы вызвать мацерацию кожи.
- Меняйте повязку в зависимости от количества экссудата и состояния раны. Повязку рекомендуется менять не реже 1 раза в 3 суток.
- При высыхании или прилипании повязки к ране, смочите или промокните повязку, чтобы легче её снять и не травмировать заживающую рану.

Инструкция по применению на местах введения катетера:

- Извлеките повязку ACTICOAT из упаковки, сохраняя стерильность.
- Не увлажняйте повязку при использовании на местах введения катетера.
- Вырежьте повязку необходимой формы.
- Закрепите повязку ACTICOAT при помощи вторичной полупрозрачной повязки, фиксируя при этом катетер.
- Ежедневно осматривайте повязку, меняйте её в зависимости от количества экссудата и состояния места введения катетера. ACTICOAT сохраняет антимикробные свойства в течение 3 суток.
- При прилипании повязки к месту введения катетера, смочите или промокните повязку, чтобы легче её снять и не травмировать место введения катетера.

Примечание: ACTICOAT может вызвать транзиторное изменение цвета окружающей кожи.

Ассортимент Код	Размер	Штук в упаковке
66000808	5см x 5см / 2" x 2"	5
66000789	10см x 10см / 4" x 4"	5
66000791	10см x 10см / 4" x 4"	12
66000792	10см x 20см / 4" x 8"	12
66000793	20см x 40см / 8" x 16"	6
66000794	40см x 40см / 16" x 16"	6
66000795	10см x 120см / 4" x 48"	6

* дюймы

Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN, Англия
Товарные знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 12/2013
Номера патентов: US 5681575, 5753251, 5770255, 5837275 www.smith-nephew.com
46521

