


SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Allevyn Tracheostomy IFU (Russian)
CODE:	N/A
THIS BSC:	xxxxxxxx / 55738
PREV BSC:	N/A
DATE:	29/01/2015
REVISION:	03 - FINAL

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1948		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	SG

ALLEVYN® Tracheostomy

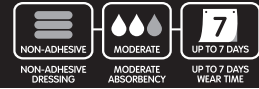

RU

smith&nephew

ALLEVYN® неклеящаяся губчатая полиуретановая повязка

Для ран с уровнем экссудата от среднего до высокого.

Описание

Повязка ALLEVYN Tracheostomy объединяет в себе абсорбирующую губчатую прокладку, размещенную между перфорированным неклеящим слоем для контакта с раной и водонепроницаемой внешней пленкой. «Замочная скважина» в повязке позволяет повязке плотно располагаться вокруг трахеостомической трубки или другого дренажа или стомы.

Механизм действия

Повязка ALLEVYN Tracheostomy позволяет абсорбировать большие объемы экссудата. Это помогает поддерживать состояние кожи пациента в области стомы. Отсутствие адгезива упрощает наложение повязки и снижает травматичность при снятии, в то время как внешняя пленка способствует предотвращению протечек экссудата через поверхность повязки.

Показания

Абсорбирующая повязка с отверстием для стомы для трахеостомии или места дренажа раны.

Инструкция по применению

- Очистите рану в соответствии со стандартными процедурами.
- Подготовьте и очистите кожу вокруг трахеостомической трубки, удалив лишнюю влагу.
- Наложите повязку ALLEVYN Tracheostomy вокруг стомы или трахеостомической трубки. Наложите белую фигурную поверхность по направлению к шее пациента.

- При необходимости повязку можно обрезать до нужной формы.
- Может использоваться дополнительная фиксация, например, повязка OPSITE® FLEXIGRID® или HYPAFIX®.
- Повязки ALLEVYN Tracheostomy не должны использоваться повторно.

Частота смены

На ранних стадиях лечения повязки ALLEVYN Tracheostomy должны часто проверяться. Повязку можно оставлять на месте без внимания более чем на 7 дней или до насыщения повязки экссудатом. Подложка из пленки OPSITE создает водонепроницаемый внешний слой, способствующий предотвращению бактериального загрязнения раны.

Снятие повязки

Для снятия повязки ALLEVYN Tracheostomy удалите фиксирующую повязку или бинт, а затем поднимите повязку с раны.

Меры предосторожности

Не используйте повязки ALLEVYN Tracheostomy с окислителями, такими как растворы гипохлорита (напр., EUSOL) или перекисью водорода, поскольку они могут разрушить абсорбирующий полиуретановый компонент повязки.

Шкала на мешке служит лишь для того, чтобы помочь в выборе повязки. Необходимо принимать меры, чтобы избежать перекрестного заражения.

Доступность продукта

Код	Размер	Доступность
66007640	9 см x 9 см	10 шт. в коробке

Доступность продукта

Код	Размер	Доступность
66007643	5 см x 5 см	10 шт. в коробке
66007637	10 см x 10 см	10 шт. в коробке
66007335	10 см x 20 см	10 шт. в коробке
66000093	15 см x 15 см	10 шт. в коробке
66007638	20 см x 20 см	10 шт. в коробке
66007630	Пяточная повязка	5 шт. в коробке

Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, England
 *Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 01/2015
 www.smith-nephew.com

CE
0086



55738