

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	IV3000 Standard IFU (Russian)
CODE:	N/A
THIS BSC:	xxxxxxxx / 55745
PREV BSC:	N/A
DATE:	22/01/2015
REVISION:	02


STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1942		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	HB

(RU)

smith&nephew

IV3000[®] STANDARD

Водонепроницаемая повязка для фиксации катетера

СТЕРИЛЬНО  Для одноразового использования. Стерилизовано окисью этилена. Не используйте, если упаковка открыта или повреждена. Хранить в сухом месте (<25 °C/77 °F).

Описание
IV3000 Standard – это повязка на основе водонепроницаемой пленки специально созданная для фиксации катетеров.

Механизм действия
Пленка в IV3000 Standard имеет молекулярную структуру, обладающую значительно большей проницаемостью для водяных паров, чем обычная пленка. Эта водостойкая пленка не является пористой и поэтому способствует предотвращению бактериального загрязнения места внутривенного введения. Эти свойства обеспечивают более сухое место введения катетера и снижение мацерации и колонизации кожи, тем самым уменьшая риск инфекций, связанных с использованием катетера. Кроме того, она накладывается легко и асептически, а благодаря фигурно распределенному адгезиву снижаются болевые ощущения при снятии. IV3000 Standard покрыта нераздражающим и несенсибилизирующим адгезивом.

Инструкция по применению
Очистите и тщательно высушите область наложения.

- Снимите примерно половину защитной бумаги и поместите повязку центром над местом введения.
- Расправьте повязку на коже пациента по направлению от катетера наружу и снимите оставшуюся защитную бумагу. Будьте внимательны, чтобы не натянуть повязку при наложении.
- Защитную бумагу можно снять от оранжевых ленточных ручек, которые полностью приклеиваются к коже пациента.
- Также часть ленточных ручек можно оторвать, пока на них находится защитная бумага. Бумагу можно снять, чтобы использовать ручки для более надежного крепления корпуса или трубок катетера. Они также могут использоваться для записей.

- При использовании более чем одной повязки не допускайте перекрытия повязок.
- Снимайте повязку, освободив оранжевые ручки и растягивая повязку параллельно коже пациента и одновременно удерживая кожу пациента и катетер другой рукой. Чтобы разрушить клеящий слой, можно также использовать спирт. В случае особенно чувствительной кожи для нарушения адгезии можно использовать теплую воду и мыло, а затем осторожно снять повязку.

Показания
Вышеупомянутые продукты подходят для фиксации периферийных, центральных и эпидуральных катетеров непосредственно на коже.

Противопоказания
Повязка IV3000 Standard должна использоваться только в местах внутривенного введения.

Меры предосторожности
Используйте только на подготовленной сухой коже. Не накладывайте повязки друг на друга и не допускайте перекрытия повязок. Периодически проверяйте место повязки и катетера, чтобы удостовериться, что фиксация является надежной и вливание происходит непрерывно и надлежащим образом, в особенности после принятия ванны или душа или намочения места повязки и катетера. Если повязка отсоединилась, убедитесь, что катетер установлен правильно, а затем наложите новую повязку. Как и при использовании других клеящихся изделий, накладывайте и снимайте повязку осторожно, чтобы не допустить повреждения чувствительной или слабой кожи.

Доступность продукта

Код	Размер	Показание	Коробка
4924	6 см x 8,5 см/2 ³ / ₈ " x 3 ³ / ₈ "	Периферийные катетеры без порта	100 (не доступно в США)
4925	10 см x 14 см/4" x 5 ¹ / ₂ "	Центральные катетеры	10
4973	10 см x 14 см/4" x 5 ¹ / ₂ "	Центральные катетеры	50
4649	10 см x 20 см/4" x 8"	Эпидуральные катетеры	50

Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, England
 *Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 01/2015
 www.smith-nephew.com
 55745

CE
0086