

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Opsite Spray IFU (Russian)
CODE:	N/A
THIS BSC:	xxxxxxxx / 55743
PREV BSC:	N/A
DATE:	29/01/2015
REVISION:	02 - FINAL

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1960		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	SG

(RU)

smith&nephew

## OPSITE<sup>®</sup> SPRAY

### Водостойкая аэрозольная повязка

Хранить при комнатной температуре (15–25 °C).

#### Описание

Водостойкая аэрозольная повязка OPSITE создает прозрачную пленочную повязку, позволяющую коже дышать. Она подходит для потертостей и легких ожогов и ожогов паром. Это простой в использовании аэрозоль, защищающий рану пленкой.

#### Показания

Водостойкая аэрозольная повязка OPSITE предназначена для применения при потертостях легких ожогах и ожогах паром.

#### Противопоказания

Не использовать для детей младше 18 месяцев.

#### Инструкция по применению

1. Вымойте руки до и после обработки раны.
2. Осторожно очистите и высушите рану и окружающую кожу.
3. Как следует встряхните и переверните контейнер и распылите с расстояния 15–20 см (6–8 дюймов) от кожи. Распылите равномерно на желаемую зону. Для достижения наилучшего результата наносите повязку несколькими тонкими слоями.


**Примечание.** При первом нанесении на поврежденную кожу может ощущаться жжение.

#### Уход за повязкой

Водостойкую аэрозольную повязку OPSITE можно оставлять на месте на несколько дней. Тонкие слои можно удалить, когда они высохнут, или позволить им самим отделиться со временем. Для облегчения снятия пленки можно использовать средство для удаления адгезивов.

#### Меры предосторожности при использовании

- Храните в недоступном для детей месте.
- Только для наружного применения.
- Не вдыхайте. Используйте в хорошо вентилируемой зоне.
- Не допускайте попадания в ГЛАЗА. В случае попадания в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
- При использовании с лекарственными средствами может возникнуть покраснение кожи.
- Не распыляйте на ткани.
- Держите вдали от открытого огня или источника тепла, поскольку содержимое является воспламеняемым. Не курите.
- Не распыляйте на открытое пламя или какой-либо раскаленный материал.
- Контейнер под давлением. Не сжигайте и не подвергайте даже пустой контейнер непосредственному воздействию тепла.
- Продукт содержит ацетон, который имеет потенциал реакции с нелатексными/синтетическими перчатками.

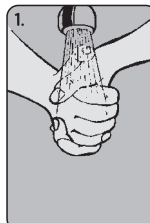

#### Доступность продукта

Доступные объемы водостойкой аэрозольной повязки OPSITE: 40 мл.

#### Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, England  
 \*Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 01/2015  
 www.smith-nephew.com

55743

CE